


Kurzanleitung: Accu-Chek® Insight Tender

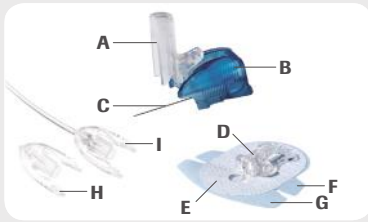

- A Nadelschutz
- B Nadelhalterung
- C Führungsnadel
- D Kanülengehäuse
- E Selbsthaftende Auflage
- F Hintere Schutzfolie
- G Vordere Schutzfolie
- H Verschlusskappe
- I Schlauch



1 Waschen Sie sich gründlich die Hände, wählen Sie eine Einstichstelle und desinfizieren Sie diese.



2 Klappen Sie den Nadelschutz so weit wie möglich zurück.



3 Führen Sie die Kanüle im Winkel von 20° bis 45° an einer Stelle ein, die nicht in unmittelbarer Nähe einer bereits kürzlich verwendeten liegt.



4 Entfernen Sie vorsichtig die vordere Schutzfolie von der selbsthaftenden Auflage.



5 Drücken Sie den vorderen Teil der selbsthaftenden Auflage fest auf die Haut.



6 Ziehen Sie die Nadelhalterung aus dem Kanülengehäuse.



7 Drücken Sie den Nadelschutz nach unten bis er einrastet.



8 Entfernen Sie die hintere Schutzfolie von der selbsthaftenden Auflage.



9 Drücken Sie die selbsthaftende Auflage fest auf die Haut.



10 Schließen Sie den Schlauch an die Insulinpumpe an, füllen Sie ihn (s.u.). **Achten Sie darauf, dass sich keine Luftblasen im Schlauch befinden!**



11 Schließen Sie den Schlauch an das Kanülengehäuse an. Füllen Sie die Kanüle mit 0,9 IE bzw. U (Menge gilt für alle Insight Tender Kanülenlängen).

Füllmengen für Schläuche (* U 100 Insulin)

Länge:	40 cm	70 cm	100 cm
Füllmenge:	9 IE bzw. U*	13 IE bzw. U*	17 IE bzw. U*

Bitte machen Sie sich auch mit den Gebrauchsanweisungen vertraut. Diese enthalten detaillierte Anweisungen und wichtige Sicherheitsinformationen.

ACCU-CHEK und ACCU-CHEK INSIGHT sind Marken von Roche.
© 2017 Roche Diabetes Care. Alle Rechte vorbehalten.

www.accu-check.de
Roche Diabetes Care Deutschland GmbH
Sandhofer Straße 116
68305 Mannheim



ACCU-CHEK®